



LaboratorielD:

Avsändare (klinik, sjukhus, telefonnummer)

Patientidentitet (namn, personnummer)

Provtagningsdatum

År: 20

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Månad ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Dag ☐

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Timme ☐

Inkluderad i ALLTogether ☐ Ja ☐ Nej

Samtycke har erhållits ☐ Ja ☐ Nej

NOPHO nr: _____ Castor nr: _____ ☐ Har inte fått studienummer än

☐ Diagnos ☐ Dag 15 ☐ Dag 29 ☐ Dag 50 ☐ Dag _____ ☐ Remissionsprov

☐ Misstänkt recidiv ☐ Verifierat recidiv ☐ Utvärdering av recidivbehandling

B-Leukocyter, LPK _____ $10^9/L$

Annan information:

☐ Benmärg

☐ Blod

☐ Plasma

☐ Serum

☐ Likvor

Tid för provtagning	Diagnos	Dag 15	Dag 29	Dag 50	Remission	Recidiv
ALL ALLTogether	Benmärg, blod, serum, plasma, likvor	Benmärg likvor	Benmärg likvor	Benmärg Högrisk patienter	Blod vid remission	Benmärg, blod, serum, plasma, likvor
ALL utom ALLTogether	Benmärg, blod, serum, plasma, likvor				Blod vid remission	Benmärg, blod, serum, plasma, likvor
AML	Benmärg, blod, serum, plasma, likvor				Blod vid remission	Benmärg, blod, serum, plasma, likvor
Alla övriga	Benmärg, blod, serum, plasma, likvor					Benmärg, blod, serum, plasma, likvor

**Provtagningsanvisning:**

- Benmärgsaspirat: 2-5 ml i NatriumHeparin– eller EDTA-rör med tillsats av 2 ml Natriumklorid 0.9%
- Perifert blod: 10 ml i NatriumHeparin– eller EDTA-rör (om LPK <50 2 rör)
- Perifert blod: 10 ml i EDTA-rör för preparation av plasma
- Perifert blod: 2-4 ml i serumrör
- Likvor: 2-5 ml utan tillsats

Instruktioner för laboratoriet:

Benmärg och blod ska förvaras och transporteras i rumstemperatur.

Plasma

Centrifugera EDTA-röret i 10 minuter vid 2000g och för över plasman till ett eller flera 1 ml kryorör.
Har man inte möjlighet att centrifugera, skicka EDTA-röret ocentrifugerat.
Märk rören med personidentifikation och provmaterial.

Serum

Centrifugera serumröret i 10 minuter vid 2000g och för över serum till ett eller flera 1 ml kryorör.
Har man inte möjlighet att centrifugera, skicka serumröret ocentrifugerat.
Märk rören med personidentifikation och provmaterial.

Likvor

Centrifugera i 10 minuter vid 300g.
Supernatanten alikvoteras till ett eller flera 1 ml kryorör.
Pipettera försiktigt och inte hela vägen till botten av röret eftersom det är viktigt att ha en cellfri supernatant.
Lös upp pelleten i det centrifugerade röret/rören med totalt 1 ml frysmedium och för över till ett 1 ml kryorör.

Om ni inte har tillgång till frysmedium, centrifugera rören och alikvotera supernatanten i en eller flera 1 ml kryorör.
Primärröret med cellpellet (observera att cellpellet inte alltid syns) skickas med övriga rör.

Finns inte möjligheten att centrifugera fördelas likvorn i 1 ml kryorör.
Märk rören med personidentifikation och provmaterial (supernatant, celler eller likvor).
Frys samtliga rör i -80°C.

Transport:

Transport av prov ombesörjs av varje sjukhus.

Frusen likvor kan skickas med frystransport batchvis.

Proverna skickas i rumstemperatur, förutom likvor direkt till Uppsala Biobank direkt efter provtagning.

Det är viktigt att proverna kommer till lab snarast så att provkvaliteten bibehålls.

Prov kan skickas alla dagar i veckan.

Kontakt:

Uppsala BioLab +46 18 617 23 88
info@uppsalabiolab.se

Kopia på samtycke skickas per post till

Uppsala Biobank/NOPHO Leukemia Biobank

Uppsala Science Park

Dag Hammarskjölds väg 38

751 85 Uppsala

NOPHO Leukemia biobank
Uppdaterad 2023-01-18

Skicka prov och remiss till:

Klinisk Kemi och Farmakologi

Provinlämningen, ingång 61, 2 trappor

Akademiska sjukhuset

751 85 Uppsala

Sweden